

Mascherine Filtranti

È UN DISPOSITIVO SANITARIO CHE PUÒ ESSERE UTILIZZATO DA PARTE DI TUTTE LE PERSONE ASINTOMATICHE PER AIUTARE A RIDURRE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DELLE NORMALI INFEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE.

- Direttiva 2001/95/CE nota “Sicurezza generale dei prodotti” (recepita in Italia come Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 172 - Decreto Legislativo. 6 settembre 2005, n. 206. Codice del consumo)
- Norma IEC 61882:2016 metodo di analisi dei rischi secondo il metodo HAZOP
- Norma IEC 61511-1:2016 Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector - Part 1: Framework, definitions, system, hardware and application programming requirements

È una mascherina realizzata in poliestere 45% e Cellulose pulp 55% che conferisce un potere assorbente ed evita che saliva e muco possano essere proiettati contro terzi e/o cose.



COMPOSIZIONE
55% Polpa di cellulosa
45% Poliestere



DIRETTIVA
2001/95/CE



DISPOSITIVO BREVETTATO
Modello e brevetto
depositato



SMALTIMENTO
Dopo l'utilizzo gettare
la mascherina nella raccolta
indifferenziata

Può inoltre proteggere il viso da:

- gocce e particelle non oleose
- particelle oleose
- dalla polvere
- dal vento
- spruzzi di saliva e muco


La mascherina in oggetto non è definibile DPI in quanto non ha lo scopo di proteggere le vie respiratorie dell'utilizzatore.

La mascherina in oggetto non è definibile dispositivo medico in quanto non può essere utilizzata in ambito medico.

Il prodotto è destinato ad essere utilizzato come mascherina per evitare che saliva e muco dell'utilizzatore possano essere proiettati contro terzi e/o cose, conferisce anche una protezione del viso.

Istruzioni generali per l'uso:


- Sanificarsi bene le mani.
- Strappare la mascherina lungo il tratteggio.
- Stendere e tendere i lacci fino ad ottenere un cordoncino.
- Allacciare dietro la testa.
- Sistemare la mascherina sul viso in modo da coprire naso e bocca.
- Sostituire dopo avere tossito o starnutito, non appena è umido.
- Rimuoverlo e buttarlo immediatamente nel cesto della raccolta indifferenziata.
- Non abbandonare nell'ambiente.
- Sanificare bene le mani.
- Non lavare e non riutilizzare per altri usi.
- Evitare sempre il contatto con fonti di calore e fiamme intense e conservare a temperatura ambiente.

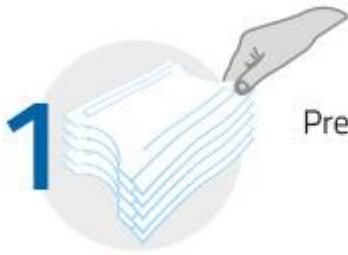

Prendi una mascherina



Tendi i lacci fino ad ottenere un cordoncino

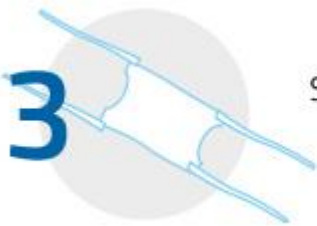

Stendi i quattro lacci



Allaccia dietro la testa



Sistema la mascherina sul viso in modo da coprire naso e bocca



Dispositivo monouso, dopo l'utilizzo gettare la mascherina nella raccolta indifferenziata